

# Instrukcja pakowania

## próbki krwi do wysłania w celu badania FoundationOne Liquid

Próbka powinna być transportowana w temperaturze 18-25 stopni C. **NIE ZAMRAŻAĆ!**

ZESTAW WYSYŁKOWY ZAWIERA:

 <p>1 plastikowy worek na materiał zagrożenia biologicznego</p>	 <p>1 żelowe opakowanie</p>	 <p>2 próbki na krew do badania pozakomórkowego DNA</p>
 <p>1 rękaw absorbcyjny</p>	 <p>1 srebrna torebka ochronna</p>	 <p>1 tekturowe pudełko zewnętrzne</p>

INSTRUKCJA PAKOWANIA:

<p><b>KROK 1</b></p> <p>Umieść próbki z krwią w rękawie absorbcyjnym.</p> 	<p><b>KROK 2</b></p> <p>Umieść próbki w worku na materiał zagrożenia biologicznego i szczelnie zamknij.</p> 
<p><b>KROK 3</b></p> <p>Zawiń worek na materiał zagrożenia biologicznego w żelowe opakowanie.</p> 	<p><b>KROK 4</b></p> <p>Umieść całą zawartość w srebrnej, ochronnej torebce i szczelnie zamknij.</p> 
<p><b>KROK 5</b></p> <p>Włóż srebrną torebkę i Formularz Przekazania Tkanki (Test Requisition Form, TRF) do tekturowego pudełka FoundationOne Liquid i zamknij je.</p> 	<p><b>KROK 6</b></p> <p>Niezwłocznie przekazaj pudełko kurierowi,</p> 