

Instrukcja przygotowania próbki

Krew pełna obwodowa

Do pobrania krwi wykorzystaj probówki dostarczone w Zestawie FoundationOne Liquid. Inne probówki nie będą akceptowane.

Instrukcja przygotowania próbek krwi


Dokładna analiza pozakomórkowego DNA wymaga odpowiedniej techniki pobrania i przygotowania próbki. Nieprzestrzeganie poniższej instrukcji może mieć wpływ na uwolnienie pozakomórkowego DNA na skutek lizy leukocytów.

- 1** Sprawdź probówki dostarczone w zestawie FoundationOne Liquid aby upewnić się, że zawarty w nich płyn jest przejrzysty bez zmętnienia lub wytrąconych kryształków.
- 2** Opisz probówki na specjalnie dostarczonych naklejkach:
 - data pobrania krwi
 - dwa identyfikatory pacjenta (numer zamówienia i data urodzenia pacjenta).

FOUNDATIONONE® LIQUID		Typ próbki Pełna krew obwodowa	
Numer Zamówienia			
/ /		/ /	
Data urodzenia pacjenta (DD/MM/RRRR)		Data pobrania próbki (DD/MM/RRRR)	

- 3** Pobierz 2 probówki pełnej krwi obwodowej po 8,5 ml do każdej.
 - Nie dopuść do cofania się zawartości probówki: probówki zawierają substancje chemiczne i ważne, aby uniknąć ich przedostania się do organizmu pacjenta.
 - Pobierz próbkę (krew) przez nakłucie żyły według CLSI H3-A6.¹
 - Napełnij całkowicie probówkę (8,5 ml krwi do każdej probówki).

- 4** Usuń adapter z probówki i od razu wymieszaj zawartość probówki poprzez delikatne jej przechylenie 8 do 10 razy. Nieskuteczne albo opóźnione mieszanie może mieć wpływ na niedokładny wynik testu. Przez jedno przechylenie probówki rozumiemy całkowity obrót probówki o 180° i jej powrót do pozycji wyjściowej.

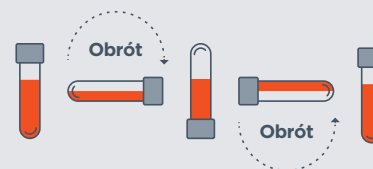

- 5** Umieść probówki, wypełniony Formularz Przekazania Tkanki (pamiętaj o uzupełnieniu rozpoznania choroby pacjenta) w przygotowanym do wysyłki zestawie.
 - Upewnij się, że każda probówka jest oklejona i opisana datą pobrania i 2 identyfikatorami pacjenta.
- 6** Zalecane jest aby wysłać probówki w dniu pobrania krwi. Powinny one być transportowane w temperaturze pokojowej. Nie wolno zamrażać ani schładzać próbek krwi.

Temperatura jest ważna.
Należy przechowywać i transportować próbki w temperaturze pokojowej (18-25° C).

NIE ZAMRAŻAĆ.

Instrukcje dotyczące wysyłki

Aby zamówić zestaw do pobrania i wysłania krwi FoundationOne Liquid lub zamówić kuriera po odbiór materiału skontaktuj się z: polska.fmi@roche.com lub pod tel. **0 22 345 18 88**

WAŻNE:

Należy zamówić kuriera po odbiór materiału z 2 dniowym wyprzedzeniem. W piątki nie wysyłamy materiału.

Więcej informacji na stronie: www.foundationone.pl | www.foundationmedicine.pl | www.foundationmedicine.com

Referencje

1. Clinical and Laboratory Standards Institute. H3-A6, Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture; approved standard-sixth edition.